

FICHE TECHNIQUE

Lunettes de protection Photothérapie « NeoShades Neotech »



Désignation : Lunettes patient unique pour protection des yeux du bébé durant les séances de photothérapie. Dispositif non stérile à patient unique.

Utilisation clinique : Choisir parmi les 3 tailles proposées celle la plus adaptée au périmètre crânien du bébé. Recouvrir les yeux avec la partie masque, ajuster et fixer avec les 2 languettes velcro le bandeau de maintien pour obtenir un ensemble solidaire. Les yeux du bébé seront parfaitement protégés contre l'éblouissement de la lumière bleue diffusée dans les tunnels ou par les rampes de photothérapie.

Caractéristiques :

- Masque oculaire en NeoFoam (mousse à cellules fermées)
- Bandeau crânien en mousse de Polyester
- Très douces et confortables
- Alvéole interne empêchant une pression sur les globes oculaires
- Ajustables et repositionnables
- Bloquent 99.994% de la lumière émise sur une plage de 400 à 740 nanomètres
- Matériaux certifiés sans Latex, sans Phtalates, sans Bisphénol A

Références	Tailles – Périmètre crânien du bébé	Conditionnement
N727 Micro	< 22 cm	50 unités / boîtes
N728 Small	22 à 30 cm	50 unités / boîtes
N729 Large	> 30 cm	50 unités / boîtes

Fabrication : USA

NEOTECH Classe I

Dispositif médical non remboursé par la sécurité sociale.

Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Doit être utilisé par des professionnels de santé qualifiés et formés.

natech-sante.fr

